

BENUTZERHANDBUCH



DREHHOCKER
Arbeitshocker

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Montage	4
3. Bedienung.....	5
4. Wartung und Pflege	6
5. Ersatzteile	6
6. Entsorgung	7
7. Herstellerangaben	7

MOIN,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Arbeitshocker der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des Produkts auf. Die hier abgebildeten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, bedient, reinigt oder desinfiziert.

Modell	Artikelnummer
SELLA-MED Work	Art.-Nr. 5970
NERO Work	Art.-Nr. 6999
SIMPO-THRONA Synchro	Art.-Nr. 5981

1. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG


- Chromteile enthalten **NICKEL** und können somit eine Kontaktallergie auslösen
- Die Drehstühle sind ausschließlich zum Sitzen vorgesehen. Jede andere Nutzung kann gefährlich sein.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Drehhocker
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst
- Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und Umweltschutz
- Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen. **Verletzungsgefahr!**
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

HINWEIS

- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
- Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen ein
- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll.
- Zur Demontage der Gasfeder können Sie uns gern ansprechen. Wir verfügen über das Sonderwerkzeug LIFT-EX, welches die Demontage ohne großen Aufwand ermöglicht.

2. MONTAGE

NERO WORK | SELLA-MED WORK

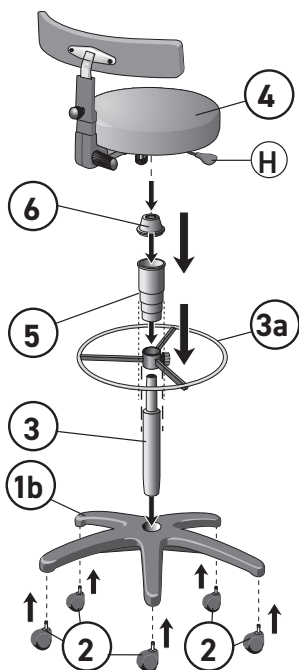



- Nach dem Öffnen des Kartons entnehmen Sie zuerst das Fußkreuz (1). Die Laufrollen (2) werden an der Unterseite des Fußkreuzes in die vorgesehenen Buchsen an den Enden der Ausleger mit einem kräftigen Ruck eingedrückt, bis sie einrasten.
- Stellen Sie jetzt das Fußkreuz auf die Rollen und setzen Sie danach die Gasfeder (3) in das Fußkreuz.
- Wenn Sie das optionale Zubehör - Fußring (3a) - erhalten haben, setzen Sie nun den Fußring auf die eingesteckte Gasfeder (3). Die gewünschte Höhe des Fußrings kann jederzeit mittels des Handrades neu eingestellt werden.
- Setzen Sie jetzt die Sitzeinheit (4) auf die Gasfeder (3). Anschließend nehmen Sie bitte auf dem Stuhl Platz, damit sich die Verbindungen unter dem Körpergewicht verkeilen können.
- Testen Sie die Gasfederhöhenverstellung durch Betätigen des Hebels H oder des Fußrings A. Sollte sich die fabrikneue Gasdruckfeder nicht auslösen lassen, muss diese in der Grundstellung gelöst werden. Hierzu betätigen Sie die Auslösung (A) oder (H) und ziehen gleichzeitig den Sitz ruckartig nach oben. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang einige Male bis die gewünschte Höhenverstellung erfolgt.

ZUSAMMENSETZEN DER SÄULENABDECKUNG (5)

Nur bei Modell Nero Work

Aufsetzen der Kappe:

- Kappe gerade auflegen.
- Kappe mit etwas Druck aufpressen bis Ring A+B eng aneinander liegen.
- Falls die Kraft zum Aufsetzen oder Kappe nicht ausreicht, den Rand unterhalb des Ringes A ggf. mit einem Spül- oder Gleitmittel einreiben.
- Stülpen Sie die Säulenabdeckung (5) über die Gasfeder. Die Spitze der Gasfeder muss ca. 30 mm aus der Manschette herausragen.

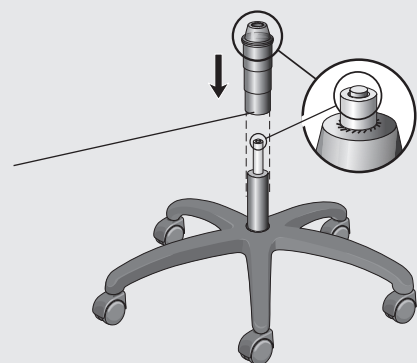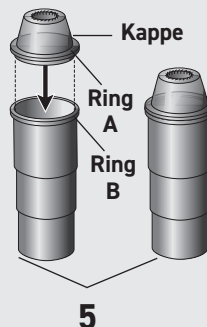

! WICHTIG !

Gemäß den in Deutschland geltenden Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften in Übereinstimmung mit der DIN EN 12529/12528 sind wir verpflichtet, beim beruflichen Einsatz von Drehrollhockern und Drehrollstühlen wegen der enormen Unfallgefahr ausschließlich intervallgebremste Rollen einzusetzen. Insbesondere wenn Sie bisher ältere Sitzmöbel benutzt haben, die diesen seit über zwei Jahrzehnten geltenden Vorschriften nicht entsprechen, stellen Sie fest, dass die Rollen der neuen Möbel nicht leichtgängig laufen. Dies ist bei den intervallgebremsten Rollen technisch beabsichtigt, um ein ungewolltes Wegrollen des Sitzmöbels zu verhindern. Erst unter Belastung wird die Bremswirkung aufgehoben, so dass Hocker oder Stuhl wie gewohnt leichtgängig laufen. Sie können dies an einer unbelasteten Rolle simulieren, indem Sie die Rolle Richtung Radachse drücken. Durch den Druck wird die Federkraft der Bremse aufgehoben, so dass die Rolle leichtgängig läuft. Wenn Sie sich also auf Ihren Drehrollhocker/Drehstuhl setzen, wird durch Ihr Gewicht die Bremswirkung an den Rollen aufgehoben, so dass Sie ungehindert mit dem Sitzmöbel verfahren können.

3. BEDIENUNG

BEDIENUNG DER HEBELAUSLÖSUNG


Sitzhöhe: Wenn Sie auf dem Stuhl sitzen, befindet sich an der rechten Seite unter dem Sitz ein Hebel (h). Durch Hochziehen dieses Hebels lösen Sie die Höhenverstellung der Gasfeder aus. Zur Aufwärtsbewegung entlasten Sie den Sitz von Ihrem Körpergewicht. Zur Abwärtsbewegung belasten (min. 35 kg) Sie den Sitz. Ist die gewünschte Höhe erreicht, drücken Sie den Hebel (h) wieder nach unten. Die Einstellung ist jetzt arretiert.

Rückenlehnenneigung: Lösen Sie das Handrad (c) durch Linksdrehen, bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und arretieren Sie durch Rechtsdrehen des Handrades (c).

Rückenlehnenhöhe: Die Höhe der Rückenlehne stellen Sie ein, indem Sie mit dem Handrad (d) die Verbindung lockern. Schieben Sie die Rückenlehne (f) soweit auf- bzw. abwärts, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Danach arretieren Sie wieder das Handrad (d).

Sitztiefe: Zum Verstellen der Sitztiefe lösen Sie das Handrad (e) unter dem Sitz. Schieben Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Arretieren Sie mit dem Handrad (e) unter dem Sitz.

NERO Work

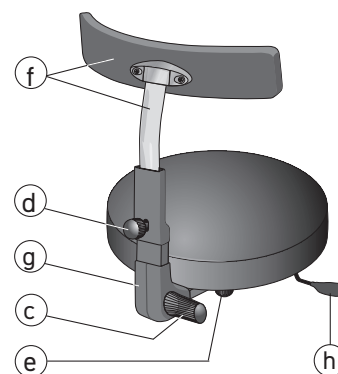



BEDIENUNG DER FUSSAUSLÖSUNG ZUR HÖHENVERSTELLUNG SIMPO-THRONA Synchro | SELLA-MED Work

Drehrollhocker mit Fußauslösung werden fertig montiert geliefert. Nach dem Öffnen des Kartons entnehmen Sie den Drehrollhocker und stellen ihn auf den Boden. Anschließend nehmen Sie bitte auf dem Sitz Platz, damit sich die Verbindungen unter dem Körpergewicht miteinander verkeilen können.

Verstellung der Sitzhöhe bei Fußauslösung: Unter dem Fußkreuz befindet sich die Fußauslösung (A) zum Verstellen der Sitzhöhe. Zur Aufwärtsbewegung halten Sie die Fußauslösung nach unten gedrückt und entlasten Sie den Sitz von Ihrem Körpergewicht, zur Abwärtsbewegung belasten Sie den Sitz. Wenn die jeweils gewünschte Höhe erreicht ist, nehmen Sie den Fuß von der Fußauslösung. Sofern eine Verstellung der Sitzhöhe nach der ersten Inbetriebnahme nicht möglich ist, beachten Sie bitte folgenden **Hinweis:** Betätigen Sie die Fußauslösung und ziehen Sie den Sitz gleichzeitig ruckartig nach oben. Die fabrikneue Gasfeder wird dadurch in der Grundeinstellung gelöst.

Der Auslösepunkt der Fußauslösung ist werkseitig eingestellt. Sollten dennoch Probleme auftreten, ist wie folgt neu zu justieren:

1. Lösen der Mutter (B) mit einem Maulschlüssel (D).
2. Verstellung an der Inbus-Schraube (C) mit dem Inbus-Schlüssel (E) wie folgt: Zeigt die Fußauslösung beim Betätigen keine Reaktion, muss die Schraube (C) im Uhrzeigersinn gedreht werden. Da die Gasfeder sehr sensibel reagiert, muss der Vorgang u.U. mit verschiedenen Stellungen der Schraube wiederholt werden.
3. Schraube (C) wieder mit Mutter (B) durch Festziehen sichern.

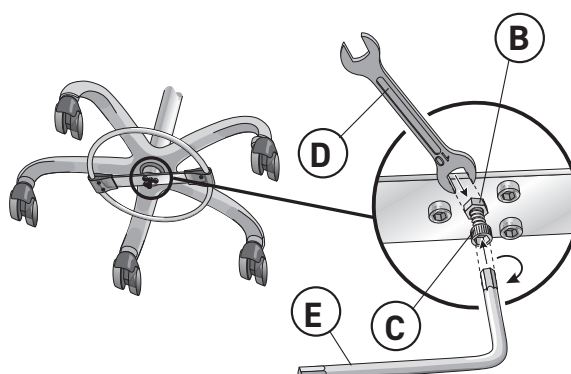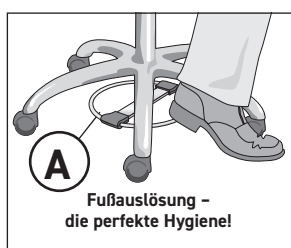

4. WARTUNG UND PFLEGE

4.1 WARTUNG

- Die Laufrollen sind je nach Verschmutzung - aber spätestens alle 3 Monate - gründlich zu reinigen, um die Bremssicherheit und die elektrische Leitfähigkeit sicherzustellen.
- Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen

4.2 PFLEGE

- **ACHTUNG!** Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
- Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen
- Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche
- KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
- sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um Folgeschäden zu vermeiden
- Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege
- Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmutzung soll Seifenwasser genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen

Empfohlenes Desinfektions-Präparat:

„**Mikrozid sensitive Liquid**“ und „**Mikrozid sensitive Wipes**“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/ Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht mehr erfolgen.


Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt:

Mail: info@simpex.de


Telefon: +49 45 54 - 99 39 0
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

5. ERSATZTEILE


5.1 SIMPO-THRONA

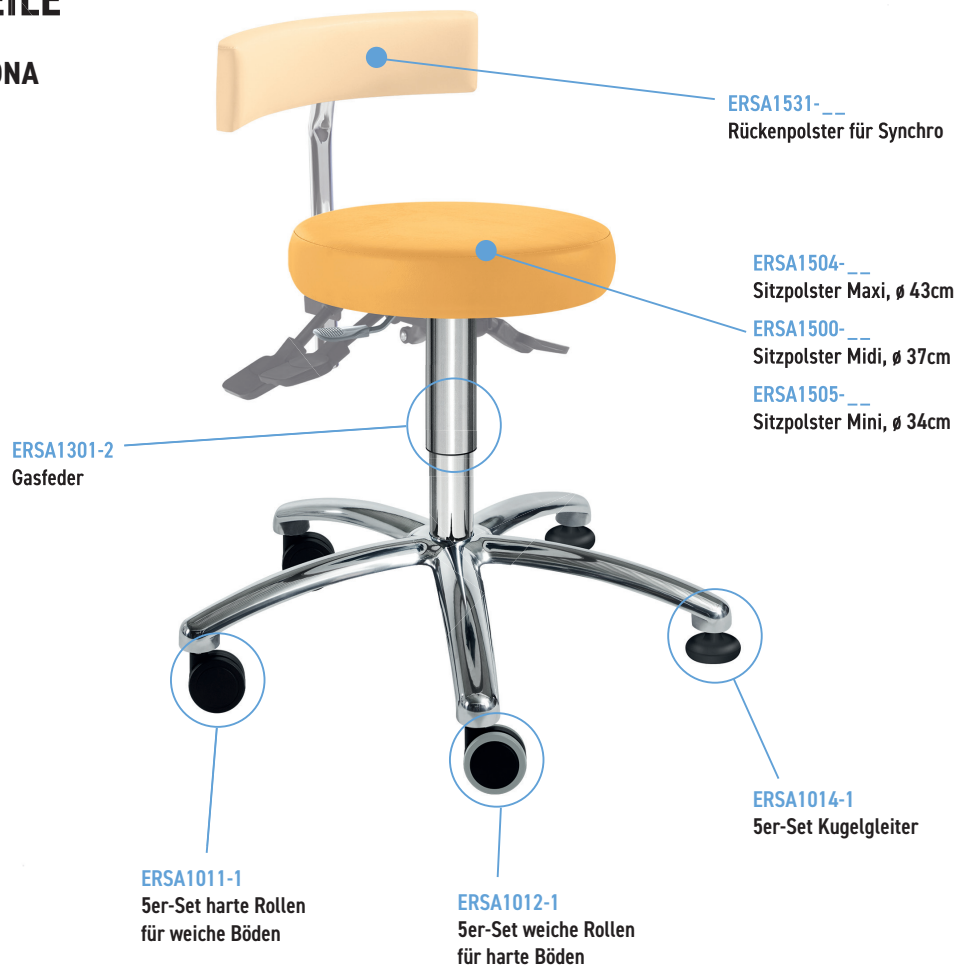

5.2 SELLA-MED

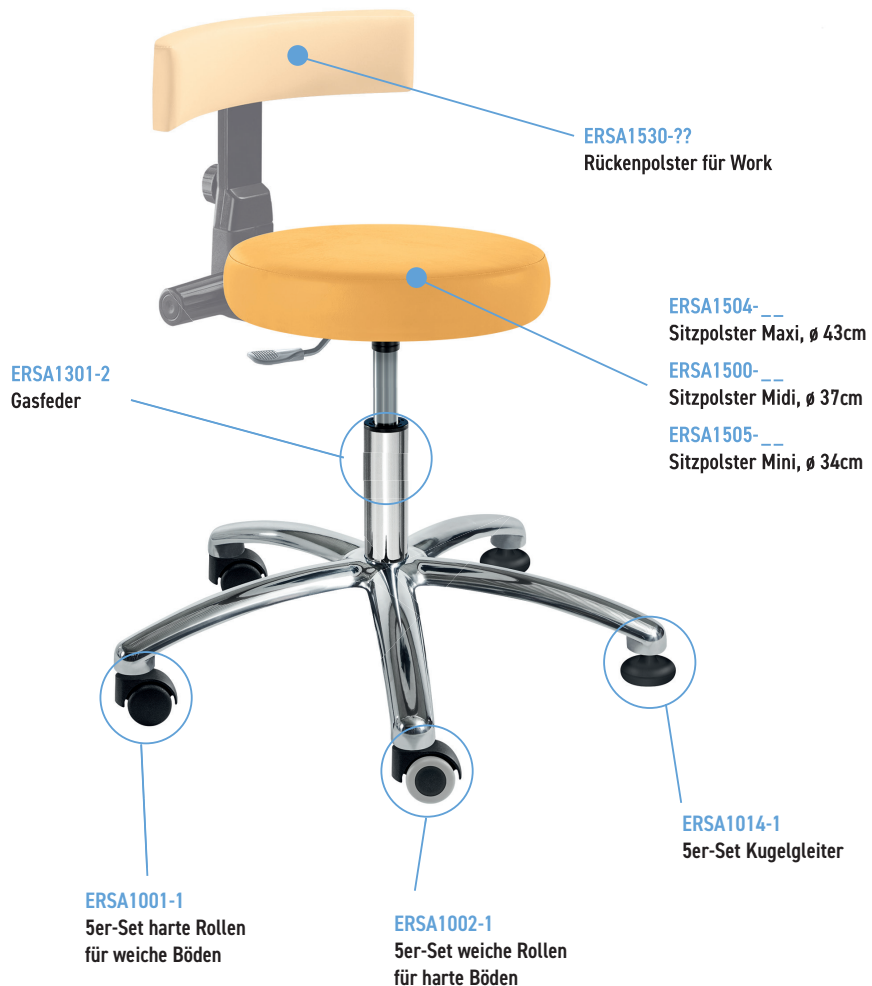

5.5 NERO

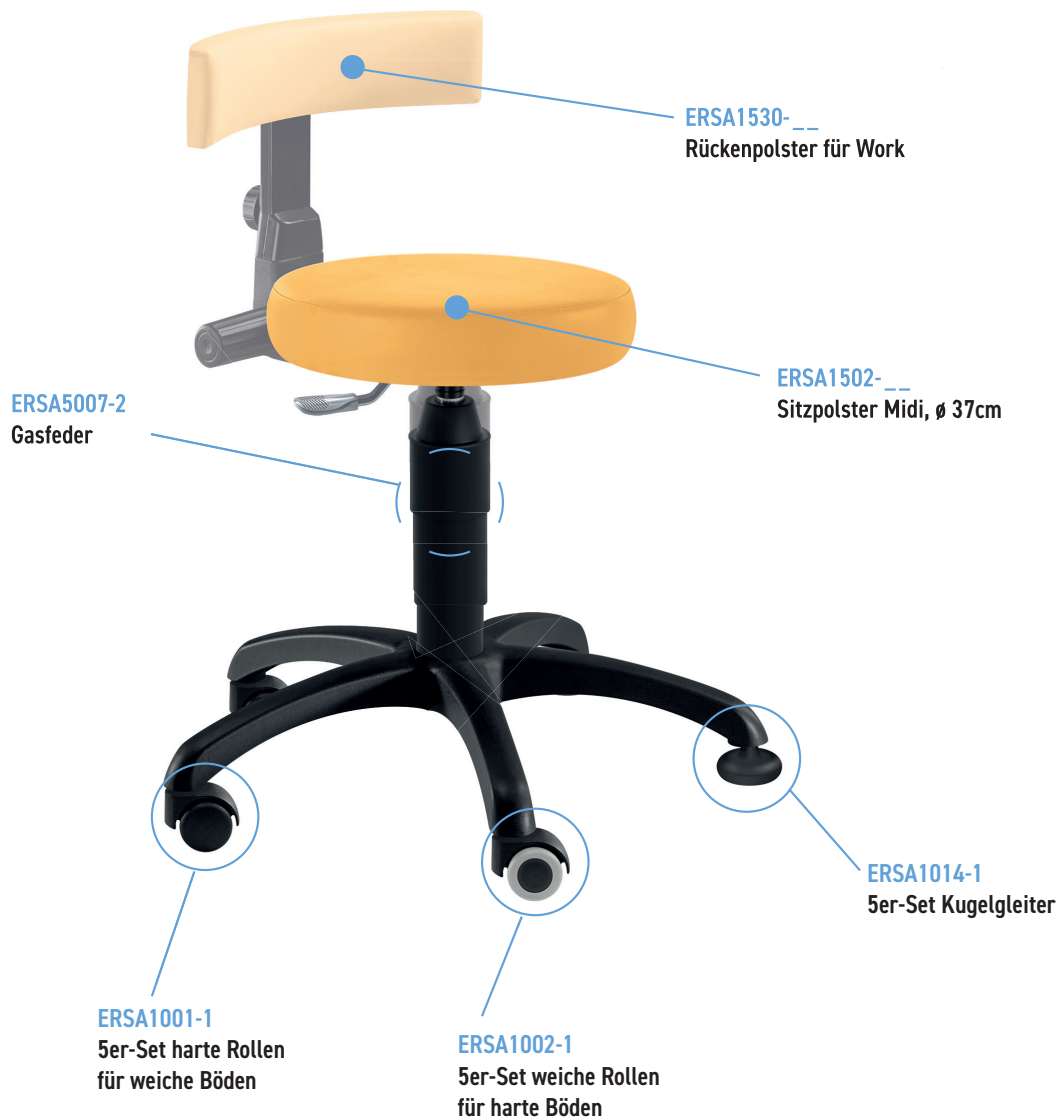

6. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich.

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

7. HERSTELLERANGABEN

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH
Adresse: Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt
Kontakt: 04554 - 99 39 0 | info@simpex.de