

QUICKSTART – VITA-PORT (ohne Sperrbox)

Die VITA-PORT-Liege verfügt über eine in die Software integrierte Sicherheitsvorrichtung, die die Liege vor unautorisierter/ungewollter Nutzung schützt. Es muss zunächst ein Entsperrcode mittels der Bedieneinheit eingegeben werden. Die Bedienung sperrt sich automatisch wieder nach 10 Sekunden, wenn keine Tasten betätigt werden.

Beim Verfahren in die Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg wird je nach Kufenart eine Sperrzone von 10 bzw. 100 mm eingehalten, um die Quetschgefahr zu verringern. Hierfür verfahren die Hubsäulen zunächst parallel, bis das Ende der Sperrzone erreicht wurde.



Vor Inbetriebnahme unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung lesen.



Tastenbelegung

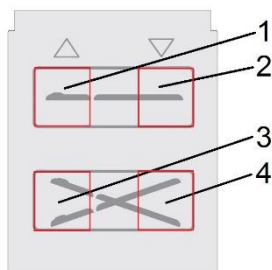


Abbildung 1: Handbedienung

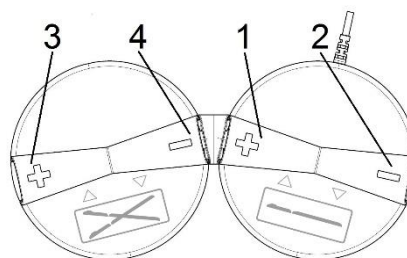


Abbildung 2: Fußbedienung

1. Parallellauf nach oben
2. Parallellauf nach unten
3. Anti-Trendelenburg-Lagerung (Fußseite fährt nach unten bzw. Kopfseite nach oben)
4. Trendelenburg-Lagerung (Kopfseite fährt nach unten bzw. Fußseite nach oben)

Entsperren der Bedienung

Zum Entsperren muss die Taste 3 gedrückt gehalten werden, während die Taste 2 dreimal hintereinander gedrückt wird.

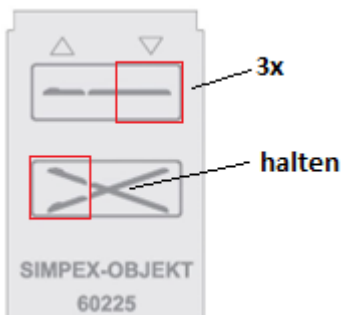


Abbildung 3: Entsperrcode bei Handbedienung

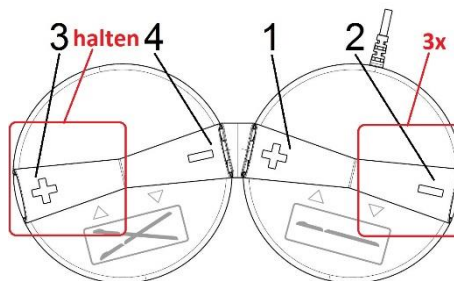


Abbildung 4: Entsperrcode bei Fußbedienung

Die Bedienung sperrt sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch wieder, also 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck.