


BENUTZERHANDBUCH

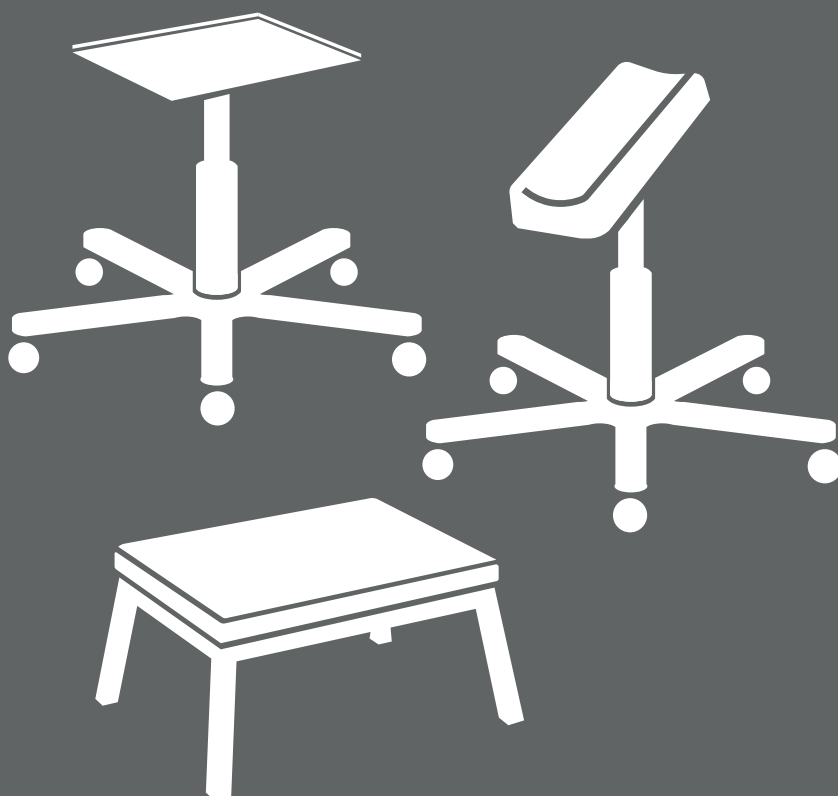

ARM- UND BEINSTÜTZEN
VARIO-STAT | PEDO-STAT

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. RONDO-TOP	4
4. SEDO-TOP	4
5. Ersatzteile	5
6. Wartung und Pflege	5
7. Entsorgung	5
8. Herstellerangaben	5

MOIN,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Hocker der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des Produkts auf. Die hier abgebildeten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, bedient, reinigt oder desinfiziert.

1. ZWECKBESTIMMUNG

Die SIMPEX-Hocker wurden als Kurzzeit-Sitze konzipiert, um Patienten während des Umkleidens, Wartens oder als Unterstützung bei gymnastischen Übungen zu dienen. Der Einsatz erfolgt unter der Aufsicht von qualifiziertem Fachpersonal in medizinischen, therapeutischen oder vergleichbaren Einrichtungen. Sie sind für den vorübergehenden Gebrauch ausgelegt und bieten Stabilität sowie Funktionalität in kontrollierten Umgebungen.

Modell	Einsatzbereich
RONDO-TOP	
SEDO-TOP	

2. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Chromteile enthalten **NICKEL** und können somit eine Kontaktallergie auslösen
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund steht.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Produkts
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst
- Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und Umweltschutz
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

HINWEIS

- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
- Unser Kunstleder ist phtalatfrei und somit allergen unbedenklich
- Die Traglastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last
- Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen ein
- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll.

3. RONDO-TOP



Artikelnummer	61529
Tragkraft	600kg
ständige Last	200kg
Oberfläche	verchromt

4. SEDO-TOP

Artikelnummer	61527
Tragkraft	600kg
ständige Last	200kg
Oberfläche	gepulvert



Nach dem Öffnen des Kartons entnehmen Sie den fertig montierten Hocker. Anschließend nehmen Sie bitte auf dem Hocker Platz, um die Standfestigkeit zu prüfen.

Ggf. können Sie Bodenunebenheiten mit den Stellschrauben an den Fußstopfen ausgleichen.

5. ERSATZTEILE

■ Wechsellpolster SEDO-TOP

Art.-Nr. ERS1520

6. WARTUNG UND PFLEGE

5.1 WARTUNG

- Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen

5.2 PFLEGE

- **ACHTUNG!** Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
- Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen
- Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche
- KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
- Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege
- Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmutzung soll Seifenwasser genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen
- sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um Folgeschäden zu vermeiden

Empfohlenes Desinfektions-Präparat:

„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/ Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt:

Mail: info@simpex.de

Telefon: +49 45 54 - 99 39 0
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

7. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich.

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

8. HERSTELLERANGABEN

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH
Adresse: Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt
Kontakt: 04554 - 99 39 0 | info@simpex.de