


# BENUTZERHANDBUCH

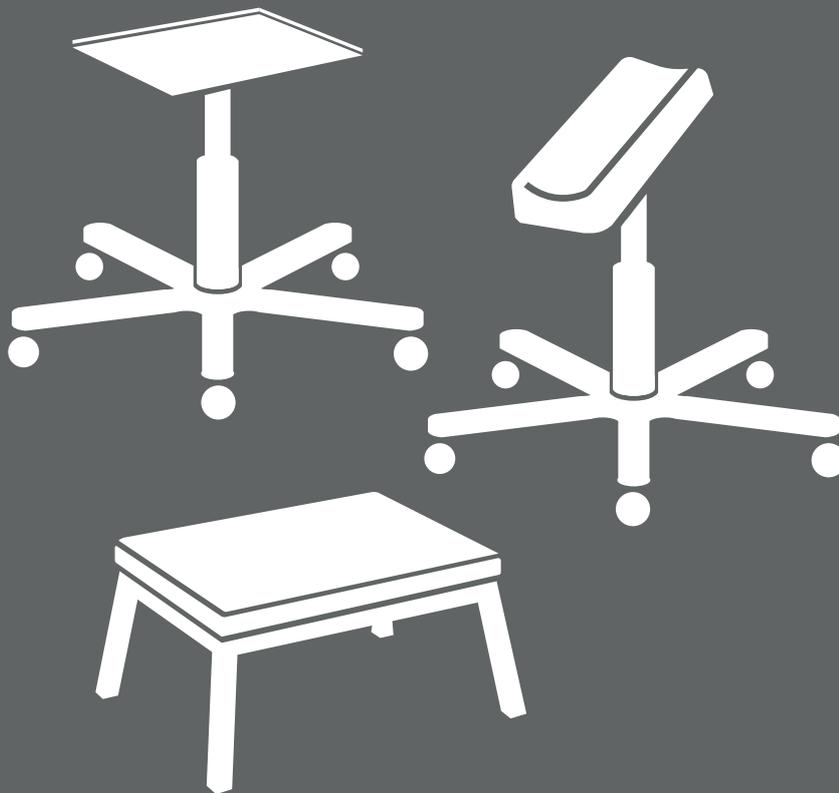

**AUFTRITTE**  
UNO-SECUR | MAGNUS-SECUR

# Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung .....	3
2. Sicherheitshinweise .....	4
3. UNO-SECUR.....	5
4. MAGNUS-SECUR.....	6
5. Wartung und Pflege .....	7
6. Ersatzteile .....	7
7. Entsorgung .....	7
8. Herstellerangaben.....	7
9. Konformitätserklärung .....	8

# MOIN,

vielen Dank, dass Sie sich für eine Spezialliege der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des Produkts auf. Die hier abgebildeten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, bedient, reinigt oder desinfiziert.

## 1. ZWECKBESTIMMUNG

Die SIMPEX-Auftritte sind für die sichere und stabile Erhöhung des Standes von Patienten oder medizinischem Personal während Behandlungen oder Eingriffen bestimmt. Sie gewährleisten Rutschfestigkeit und Stabilität und sind für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert.

Modell	Einsatzbereich
UNO-SECUR	
MAGNUS-SECUR	

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### **ACHTUNG**

- Chromteile enthalten **NICKEL** und können somit eine Kontaktallergie auslösen
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund steht.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Produkts
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst
- Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und Umweltschutz
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.  
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

### **HINWEIS**


- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
- Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen ein
- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll.

## 3. UNO-SECUR



UDI-DI	4255626170
Artikelnummer	42278
Tragkraft	600kg
ständige Last	200kg

### 3.1 MASSE

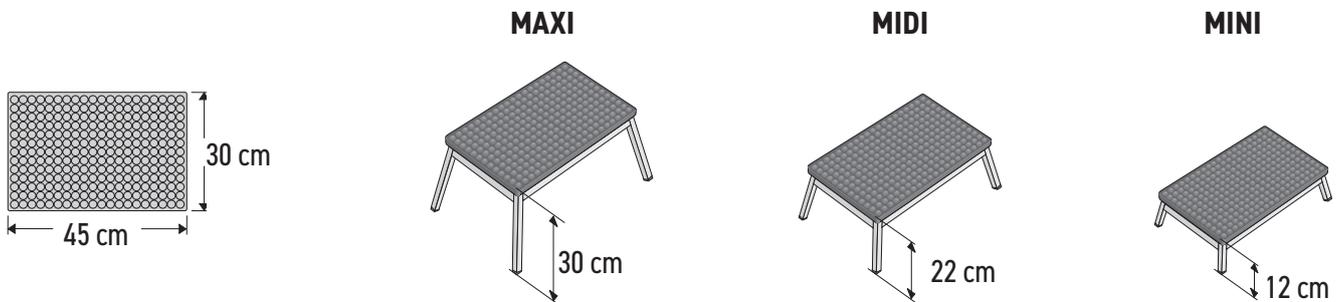


Diese Auftritte entsprechen sowohl der DIN EN 14183:2004-03 als auch der Unfallverhütungsvorschrift VBG 74.

## 4. MAGNUS-SECUR



<b>UDI-DI</b>	<b>4255626172</b>
Artikelnummer	42286
Tragkraft	600kg
ständige Last	200kg

### 3.1 MASSE

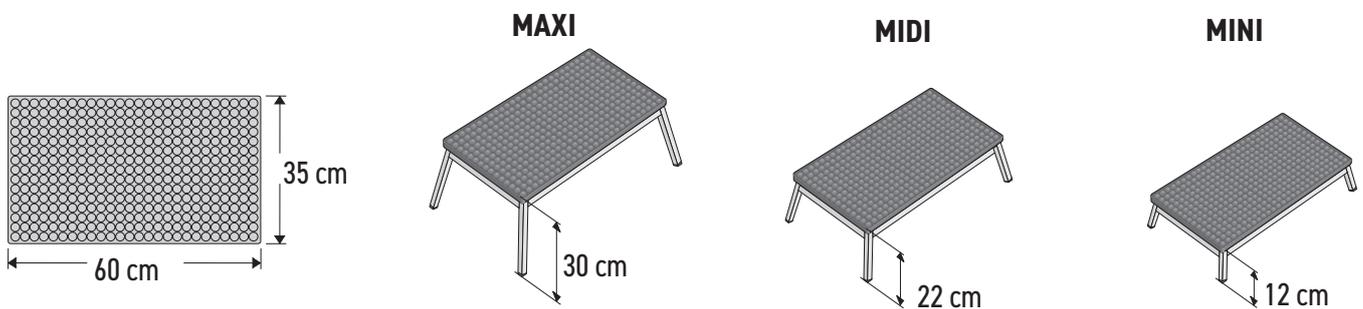

Diese Auftritte entsprechen sowohl der DIN EN 14183:2004-03 als auch der Unfallverhütungsvorschrift VBG 74.

## 5. WARTUNG UND

### 5.1 WARTUNG

- Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen

### 5.2 PFLEGE

- **ACHTUNG!** Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
- Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen
- Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche
- KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
- sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um Folgeschäden zu vermeiden

Empfohlenes Desinfektions-Präparat:

„Mikrozyd sensitive Liquid“ und „Mikrozyd sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr\* aus D-Norderstedt

**ACHTUNG!** Sollten Sie unübliche Veränderungen/ Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt:

**Mail:** [info@simpex.de](mailto:info@simpex.de)

**Telefon:** +49 45 54 - 99 39 0  
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

## 6. ERSATZTEILE

- Auftrittplatte UNO-SECUR

Art.-Nr. ERSA2738

## 7. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.  
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich.

**Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.**

## 8. HERSTELLERANGABEN

**Hersteller:** Firma SIMPEX GmbH  
**Adresse:** Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt  
**Kontakt:** 04554 - 99 39 0 | [info@simpex.de](mailto:info@simpex.de)

## EU-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung

gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 2017/745 nach Anhang IV

Hersteller / Manufacturer

SIMPEX GmbH  
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 22  
23812 Wahlstedt  
Deutschland  
SRN: DE-MF-000009464

Gekennzeichnet durch / Marked by



erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgende(s) Produkt(e)  
declares on its own authority that the following medical device(s)

	Basis UDI-DI	Artikelnummer
UNO-SECUR	4255626144	42278
MAGNUS-SECUR	4255626144	42286

für folgende Zweckbestimmung  
for the further purpose

Sicherheitsauftritte zum Einsatz in medizinisch genutzten Räumen.  
Safety steps to be used in a medical environment.

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Verordnung entsprechen  
comply with the essential requirements of the following regulation

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2017  
Agreement of the EU directive for medical devices 2017/745  
**Medical Device Regulation**

mit folgenden angewandten Normen  
with the following applied standards

DIN EN ISO 15223-1:2013-02	Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen Teil 1: Allgemeine Anforderungen Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer Part 1: General requirements
DIN EN 14183:2004-03	Tritte Tritte Step stools Step stools

Klassifizierung nach MDR  
Classification according to MDR

Klasse 1 - gemäß Anhang VIII der MDR, Regel 1  
Class 1 - Annex IV of MDR, Rule 1

Aussteller / Issued by

Benjamin Storm (Geschäftsführer / CEO)

Wahlstedt, den 01.04.2023

Ort, Datum / place, date

Unterschrift / signature

**Qualität, Sicherheit & Hygiene**  
Medizinmöbel seit 1972